


フェイスシールド

フレキシブル
サイズ調整可能


1シート構造
組み立て簡単

収納時
かさばらない
備蓄用に最適

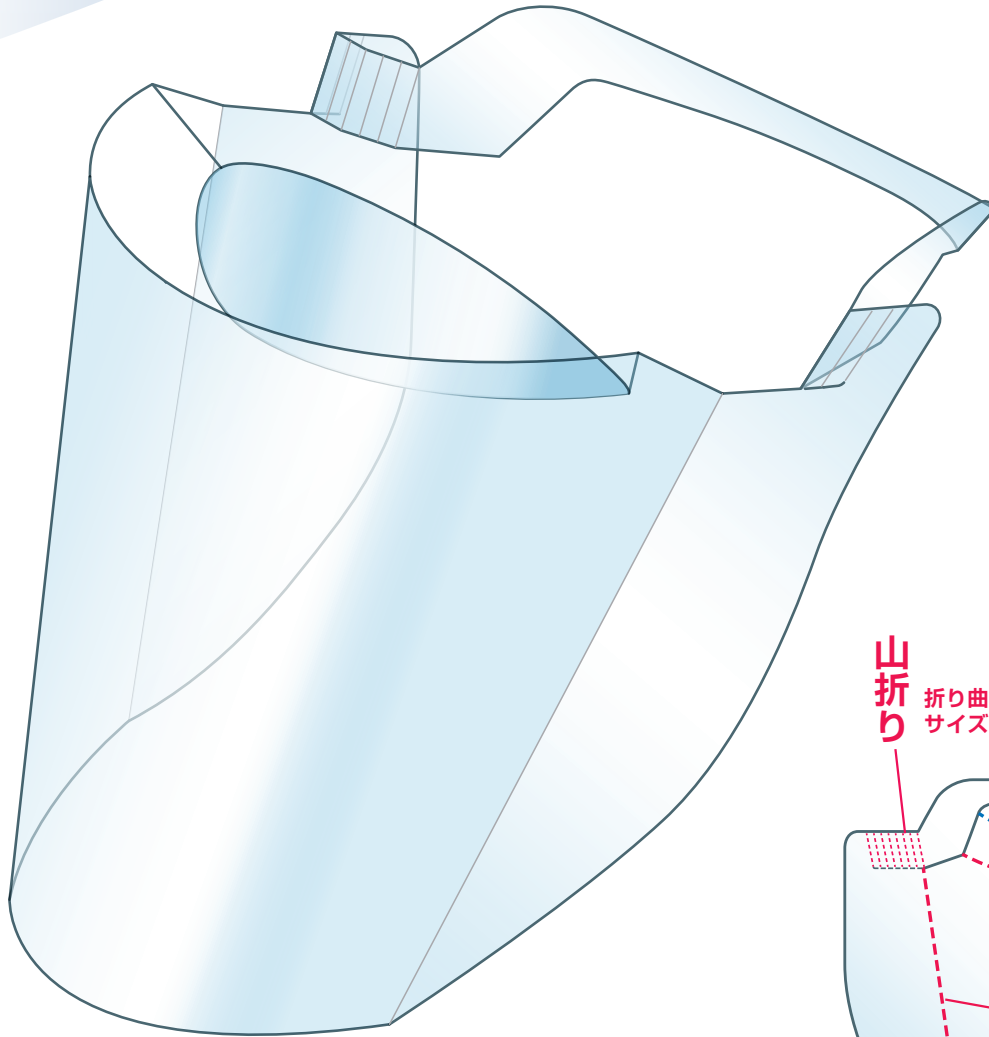

山折り
折り曲げ位置で
サイズ調整


谷折り

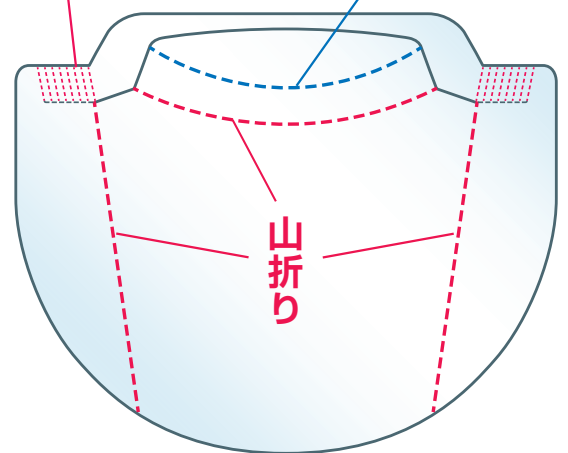

人と接するお仕事のため、安全・安心のため、
お使いください。防護服や眼鏡の上から装着可能です。



装着時イメージ

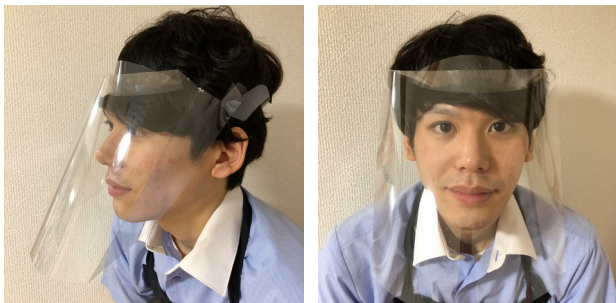

⚠ 警告 (感染症等対策にご使用の場合)

使用後、外面は汚染されている可能性があります。
取り外しの際、素手で直接外面を触れないよう注意してください。
本製品は、使い捨て使用を想定しています。

⚠ 注意

火のそばでの使用はお控えください。
本製品本体シートの断面や角で、顔や手を傷つけないよう、
ご注意ください。特に、脱着時にお気を付けてください。

PET 製 (厚さ0.25mm) 納品時寸法 370mm×300mm
MADE IN JAPAN

●商品名:フェイスシールド(50枚入)
●入数:50枚入●商品コード:XZV96996



株式会社 パックタケヤマ


◀◀ ホームページ <http://www.p-takeyama.co.jp>

●名古屋営業部 〒496-0004 愛知県津島市蛭間町字耕田322-1 TEL0567-24-5181 FAX 0567-24-5440
●東京営業部 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目17番2号 TEL03-4346-5181 FAX 03-4346-5440
秋葉原サウスイーストビルディング5階
●大阪営業部 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江2-2-5 SYDビル5階 TEL06-6442-8108 FAX 06-6450-1510

組み立て手順・使用上の注意

1

①②③の順に
折り曲げます。

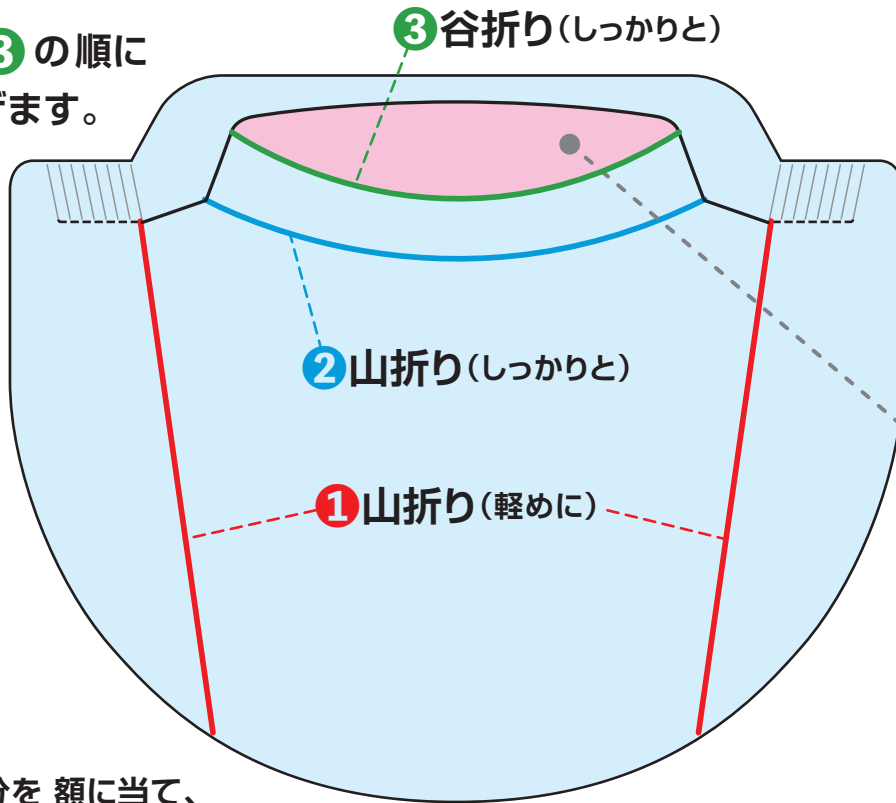

⚠️
お肌に合わないと感じたら
使用を控えてください。

額当て部分



2

額当て部分を額に当て、
ベルト部分を後頭部に回します。

3

ちょうど良くフィットするまで、
ベルト根元のツナギを
「プチッ」「プチッ」と
ひとつずつちぎっては折り曲げ、
装着してみてください。
1ヶ所ちぎると、ベルトが
1cm伸びます。

⚠️ 着脱の際は、突起部に
十分ご注意ください。

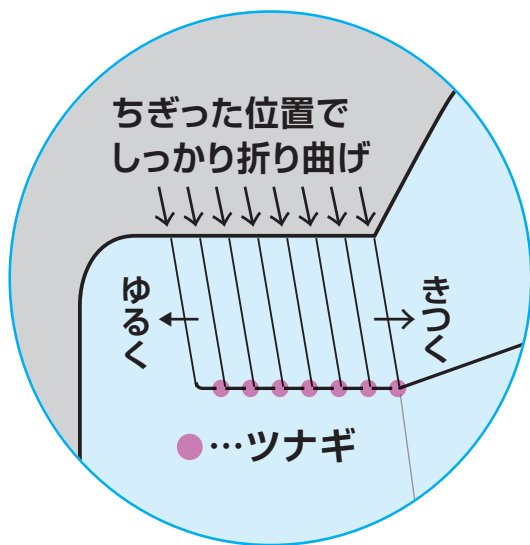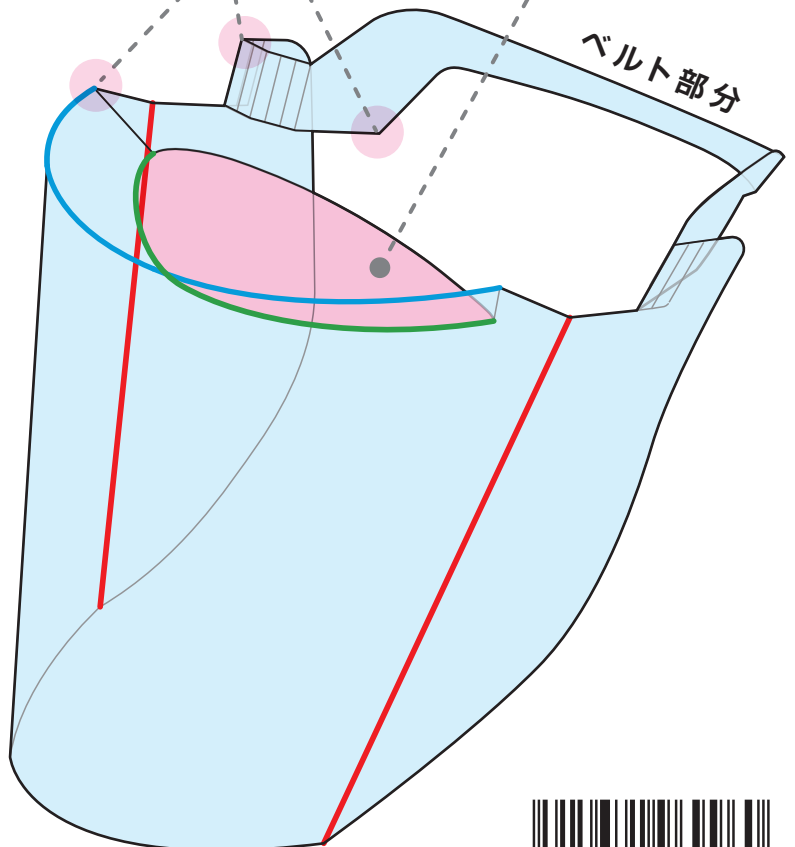

●商品名:フェイスシールド(50枚入) ●入数:50枚入 ●商品コード:XZV96996



株式会社 パックタケヤマ

◀◀ ホームページ <http://www.p-takeyama.co.jp>

●名古屋営業部 〒496-0004 愛知県津島市蛭間町字榎田322-1 TEL0567-24-5181 FAX 0567-24-5440
●東京営業部 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目17番2号 TEL03-4346-5181 FAX 03-4346-5440
秋葉原サウスウエストビルディング5階
●大阪営業部 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江2-2-5 SYDビル5階 TEL06-6442-8108 FAX 06-6450-1510